



Procédure de prélèvement d'un hémogramme en cas d'agglutinines froides

Cette procédure s'applique à tout patient présentant une agglutinine froide, mise en évidence au laboratoire ou connue du service prescripteur.

La détection d'agglutinines froides au laboratoire entraîne l'ajout d'un des commentaires suivants sur le compte-rendu:

① En cas d'agglutinines froides indissociables (commentaire remplaçant le résultat des GR) :

Présence d'agglutinines froides impossibles à dissocier par le passage à l'étuve. Veuillez acheminer les prochains tubes d'hémogramme au laboratoire d'Hématologie en suivant la procédure spécifique des agglutinines froides (cf. manuel de prélèvement du Pôle de Biologie-Pathologie).

② En cas d'agglutinines froides dissociées par le passage à l'étuve (commentaire sur le résultat des GR) :

Présence d'agglutinines froides. Veuillez acheminer les prochains tubes d'hémogramme au laboratoire d'Hématologie en suivant la procédure spécifique des agglutinines froides (cf. manuel de prélèvement du Pôle de Biologie-Pathologie).

Procédure applicable 7j/7, 24h/24



Lorsque le patient est prêt à être prélevé :

① Appeler le laboratoire d'Hématologie cellulaire au 16878 (ou au 36036 en période de garde de nuit) pour passer la demande en précisant les données du patient (nom, prénom, DDN, IPP) et le n° d'UH de votre unité. Une pochette isotherme préchauffée à 37°C contenant un tube EDTA de 4 mL vous sera envoyée rapidement via une cartouche jaune à la gare de l'UH communiquée.

/!\ Conserver la cartouche, qui servira à retourner l'échantillon /!



② A réception, prélever immédiatement l'hémogramme en utilisant le tube EDTA présent dans la pochette isotherme (à sortir au dernier moment)



③ Après l'avoir étiqueté, replacer le tube dans la pochette isotherme, la refermer à l'aide du Velcro, puis placer la pochette avec le bon de demande dans la cartouche jaune qui a servi à l'envoi



HMN-
HEMATOLOGIE
1, rue Gustave Eiffel
94 010 CRETEIL

**MP VISKALI Prélèvement d'un
hémogramme en cas
d'agglutinines froides**

Ref : HM-H-PLUS-MT-PRE-004-v01

Version : 01

Applicable le : 04-10-2019



④ Renvoyer immédiatement la cartouche au laboratoire d'Hématologie cellulaire (1^{er} sous-sol); le retour est automatique grâce à la puce RFID de la cartouche jaune (inutile de saisir le n° de gare)